

Simboli utilizzati

	Simbolo certificazione sistema di qualità
	Utilizzare entro/ Date di scadenza
	Seguire le istruzioni per l'uso
	Avvertenza di sicurezza
	Medical Device
	Seguire le istruzioni per l'uso
	Sterilizzato a vapore
	Semplice sistema di barriera sterile
	Semplice sistema di barriera sterile
	Produttore: Medilens Sântis AG, Röschtstrasse 18, 9000 St. Gallen www.medilens-saentis.ch , Tel: +41 71 227 1010
	Seguire le istruzioni per l'uso
	EU rappresentante autorizzato: Hecht Contactlinsen GmbH, Dorfstrasse 2-4-79820 Au bei Freiburg
	Non risterilizzare

Le presenti istruzioni per l'uso si applicano a tutte le lenti a contatto morbide individuali prodotte da Medilens Sântis AG.

Indicazioni generali- la lente a contatto è un prodotto medico

Avete fatto una buona scelta. Avete ricevuto lenti a contatto personalizzate e su misura. Ci auguriamo che vi troviate bene con le vostre lenti a contatto morbide fin dall'inizio. Di

Questo opuscolo contiene importanti informazioni sull'uso e sulla sicurezza del prodotto: si prega di leggerlo attentamente e di conservarlo in un luogo sicuro. In caso di dubbi, chiedete al vostro specialista. Seguite le raccomandazioni del vostro contattologo, le istruzioni riportate sulle etichette dei prodotti per la cura delle lenti a contatto e tutte le istruzioni contenute in questo opuscolo. Questo vi aiuterà a mantenere il comfort delle vostre lenti a contatto e a prolungarne la durata. Se la lente a contatto deve essere utilizzata da una persona che, a causa della gravità della sua disabilità, non è in grado di utilizzare correttamente il prodotto secondo le presenti istruzioni per l'uso, un genitore o un tutore deve assicurarsi che venga utilizzata correttamente.

Indicazioni d'uso

Le lenti a contatto morbide sono progettate per essere applicate all'occhio umano. Vengono utilizzate per correggere i difetti visivi sferici/ sfero-cilindrici e la presbiopia. Vengono utilizzate per correggere otticamente il difetto visivo e ottimizzare la visione. Se indicato, il prodotto può essere utilizzato per tutte le fasce d'età. In generale, non esiste un'età fissa in cui le lenti a contatto possono o non devono più essere utilizzate. La decisione dipende dalle circostanze individuali, come le indicazioni o le controindicazioni mediche, e dal tipo di applicazione.

Le lenti a contatto di Medilens Sântis AG sono lenti a contatto personalizzate per il riutilizzo da parte di un singolo paziente, cioè sono realizzate appositamente per un singolo paziente e sono destinate a molteplici applicazioni. Dopo aver indossato le lenti a contatto per un certo periodo di tempo (tempo di utilizzo giornaliero individuale determinato dall'applicatore), il paziente le rimuove, le pulisce, le conserva e le utilizza nuovamente il giorno successivo o a determinati intervalli. Il periodo di utilizzo è determinato dall'applicatore di lenti a contatto..

Controindicazioni

- Non utilizzate le lenti a contatto in caso di
- condizioni lacrimali o palpebrali non adatte all'uso di lenti a contatto
 - per l'occhio secco patologico / grave insufficienza della secrezione lacrimale
 - allergie note agli ingredienti dei materiali delle lenti a contatto
 - Uso di farmaci per i quali l'uso di lenti a contatto non è indicato dal punto di vista medico
 - Malattie, lesioni o alterazioni della cornea e delle palpebre che sconsigliano l'uso delle lenti a contatto per motivi medici.
 - Alterazione della sensibilità corneale in cui l'uso di lenti a contatto non è indicato dal punto di vista medico
 - Infiammazione acuta dell'occhio
 - Farmaci che possono influire sull'uso delle lenti a contatto..

Concordate con il Vostro contattologo le procedure di applicazione.

Confezione

Le lenti a contatto morbide della Medilens Sântis AG vengono fornite singolarmente in un contenitore sigillato. Le lenti sono immerse in una soluzione salina fisiologica isotonica (NaCl 9g/l, Na+ 154mmol/l, Cl- 154 mmol/l, Aqua ad iniect. q.s. per 1000 ml, osmolarità teorica) e sono sterilizzate a vapore come indicato sull'etichetta della confezione. Se le lenti a contatto della Medilens Sântis AG vengono nel contenitore originale, al momento dell'apertura si deve avvertire un "crac". Tale "crac" garantisce l'avvenuta disinfezione delle lenti a contatto. Potete applicare direttamente le lenti a contatto.

Attenzione !

Se la confezione originale è già stata aperta (non si sente più lo scricchiolio all'apertura) o se la data di scadenza stampata sulla confezione (ad es. 2010-06-12) è passata, non mettere le lenti a contatto negli occhi in nessun caso! Vi è il pericolo di danneggiare gli occhi. Rivolgetevi in ogni caso al Vostro contattologo e riusate le lenti solamente dopo il suo benestare. La data della scadenza si riferisce allo stato sterile del prodotto della confezione originale chiusa fino alla data indicata.

Avvertenze

Se utilizzate soluzioni non adatte alla cura delle lenti a contatto morbide, potreste danneggiare le lenti a contatto e la salute dei Vostri occhi.

- Osservate le istruzioni per l'uso dei prodotti di manutenzione delle lenti a contatto. Rispettare le specifiche di temperatura!!
- Non utilizzate più di una volta la stessa soluzione conservante nella custodia delle Vostre lenti.
- Non utilizzate soluzioni dopo la data di scadenza.
- Non indossare le lenti a contatto senza occhiali protettivi adeguati, in presenza di vapori o liquidi e in caso di rischi professionali.
- In particolare: in linea di principio, qualsiasi contatto con acqua non sterile (ad esempio acqua di rubinetto, idromassaggio, nuoto, partecipazione a sport acquatici) comporta il rischio di contaminazione delle lenti a contatto e quindi il rischio di un'infezione microbica..
- Non conservare mai le lenti a contatto durante la notte in una soluzione fisiologica.
- Non conservate le lenti a contatto in luoghi esposti ai raggi del sole, ad es. in macchina. Le temperature elevate (superiori ai 50° C) possono provocare deformazioni irreversibili.
- Non congelare le lenti a contatto
- Unghe lunghe o affilate possono causare danni alla lente a contatto e all'occhio
- Se la lente presenta un bordo difettoso o superfici irregolari, sospendete l'applicazione

- Non cambiate mai i parametri delle lenti a contatto o il tipo di lente a contatto senza aver consultato il vostro contattologo.

Avvertenze particolari in caso di lenti morbide disidratate

Le lenti a contatto morbide non devono mai asciugarsi né essere applicate in uno stato di disidratazione. Nel caso in cui le lenti a contatto si siano asciugate, ammorbidirle inumidendole con il liquido conservante o con la soluzione salina che avete a disposizione. Dopodiché le lenti potranno essere rimosse con cautela ed essere immerse per almeno un'ora nella soluzione conservante consigliata. Pulite e disinfettate poi le lenti reidratate. Lasciate quindi controllare le lenti dal Vostro contattologo per verificare che siano in condizioni perfette.

Tempi d'uso iniziali e controlli

I tempi d'uso giornalieri dei diversi tipi di lenti a contatto variano a seconda delle caratteristiche del prodotto. Allo stesso modo, per alcuni prodotti la durata di utilizzo è limitata. Le durate di utilizzo massime più comuni sono: 1 giorno, 1 settimana, 4 settimane, 3 mesi, 6 mesi come ad es.

Per proteggere i Vostri occhi e per evitare gravi complicazioni, è assolutamente necessario seguire il programma di adattamento stabilito dal contattologo e non superare la durata di utilizzo massima.

Durante la fase di adattamento, non indossate le lenti a contatto per tutto il giorno. Il vostro contatto-logo Vi dirà come aumentare il tempo in cui portare le lenti a contatto.

Utilizzate quotidianamente il sistema di manutenzione delle lenti a contatto consigliato dal produttore o dal Vostro contattologo. Recatevi almeno 2 volte all'anno dal vostro contattologo per un controllo. Se il comfort d'uso dovesse peggiorare, sospendete l'uso delle lenti a contatto e rivolgetevi al contattologo..

Modalità d'uso

- Lavate ed asciugate accuratamente le mani prima di toccare le lenti a contatto.
- Controllate che la lente a contatto sia integra prima di applicarla sull'occhio.
- Se le lenti a contatto cadono a terra devono essere raccolte con il polpastrello del dito umido oppure con la ventosa.
- Non trascinate in alcun caso le lenti a contatto sulla superficie del tavolo o dello specchio.
- Le lenti a contatto cadute devono essere lavate in ogni caso con una soluzione di risciacquo prima di procedere ad una pulizia completa.
- Chiudendo il contenitore delle lenti a contatto, assicuratevi che le lenti siano riposte al centro del contenitore per evitare così il danneggiamento dei bordi delle lenti stesse.

Prima di applicare



La lente a contatto morbida può ripiegarsi su se stessa quando viene maneggiata. - Le superfici esterne e interne sono invertite. Pertanto, prima di indossarla, accertarsi ogni volta che la lente a contatto sia sul lato corretto. A tale scopo, appoggiare la lente a contatto sul dito e controllarne la forma come mostrato nel diagramma. Se la posizione è corretta, i bordi devono essere rivolti verso l'interno. Se la posizione non è corretta (piegata), i bordi sono rivolti verso l'esterno..

Posare



La lente a contatto morbida può ripiegarsi su se stessa quando viene maneggiata. - Le superfici esterne e interne sono invertite. Pertanto, prima di indossarla, accertarsi ogni volta che la lente a contatto sia sul lato corretto. A tale scopo, appoggiare la lente a contatto sul dito e controllarne la forma come mostrato nel diagramma. Se la posizione è corretta, i bordi devono essere rivolti verso l'interno. Se la posizione non è corretta (piegata), i bordi sono rivolti verso l'esterno.. Als Variante dazu bietet sich das Aufsetzen mit einem speziellen Sauger an. Ihr Anpasser zeigt Ihnen die für Sie bessere Methode

Rimozione delle lenti

Prima di togliere le lenti, accertatevi che queste si trovano al centro della cornea..

Metodo A


Tenete la ventosa tra il pollice e l'indice e abbassate con il dito medio della stessa mano la palpebra inferiore. Con l'altra mano sollevate la palpebra superiore. Appoggiate delicatamente la ventosa sul bordo della lente a contatto e togliete così la lente con un movimento di trazione.

Metodo B

Aprite bene l'occhio. Il dito di una mano ferma la palpebra inferiore. Un dito dell'altra mano spinge leggermente la palpebra superiore in basso in modo da piegare leggermente la lente in direzione orizzontale favorendone la fuoriuscita.

Metodo C

Aprite bene l'occhio. Toccate leggermente con pollice e indice i bordi della lente a contatto e piegatela leggermente, senza comprimerla troppo. Vi consigliamo di utilizzare il metodo C solo quando il metodo B risulta inadeguato o in mancanza di una ventosa poiché in alcune circostanze il metodo C può danneggiare la lente a contatto..

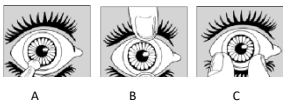

lenti a contatto contengono un filtro per i raggi UV, esse non sostituiscono gli occhiali da sole

Se hai avuto un incidente grave correlato alle vostre lenti a contatto, contattate il vostro contattologo.

La cura giusta

L'uso quotidiano di prodotti speciali per la cura delle lenti a contatto personalizzati è necessario per garantire un comfort di utilizzo ottimale. La regolarità e la cura giocano un ruolo decisivo..



Una cura inadeguata può provocare gravi danni agli occhi

I sistemi che funzionano bene con pochi o nessun conservante si sono dimostrati efficaci. Per questo motivo consigliamo generalmente i perossidi non conservati o le alternative corrispondenti. Il vostro contattologo sceglierà il sistema di manutenzione più adatto a voi. Per garantire il comfort di utilizzo e la compatibilità a lungo termine, è necessario seguire sempre le sue raccomandazioni..

Trucco

Se indossi le lenti a contatto, non devi fare a meno del trucco: Al contrario: il vostro consulente personale o consulente cosmetico avrà cosmetici per gli occhi per le persone che indossano le lenti a contatto pronte per te.

L'ombretto crema, la matita per gli occhi e il mascara sono stati testati clinicamente e sono composti in modo da non irritare gli occhi. Tuttavia, considera alcuni suggerimenti:

- Utilizzare cosmetici e creme solo dopo aver indossato le lenti a contatto.
- Rimuovi il trucco dopo aver rimosso le lenti a contatto.
- Il trucco per gli occhi deve essere privo di grassi, solubile in acqua e adatto a chi indossa le lenti a contatto.
- È necessario applicare la lacca prima di indossare le lenti a contatto
- Dopo aver applicato una nuova crema per il viso o per gli occhi, prestare attenzione a eventuali cambiamenti nella bagnatura delle lenti a contatto.
- Cosa NON dovresti usare: ombretto in polvere, mascara con i capelli, matite per eyeliner, che vengono applicati all'interno del bordo della palpebra. Queste sostanze spesso pratanano alla contaminazione della superficie delle lenti a contatto e quindi a ridurre il comfort.

Disposizione

Non gettare le lenti a contatto nel gabinetto. Le lenti a contatto devono essere smaltite con i rifiuti domestici.

Se si è verificato un incidente grave in relazione alle lenti a contatto, questo deve essere segnalato al Medilens Sântis AG e all'autorità competente.

MEDILENS
SANTIS AG

€ 0483

Medilens Sântis AG – Röschstrasse 18
9000 St.Gallen – Schweiz –

www.medilens-saentis.ch

Versione 07.2023

Interazione con altri prodotti

Per evitare interazioni indesiderate delle lenti a contatto con il sistema di manutenzione, il Vostro contattologo Vi consiglierà il prodotto di manutenzione a Voi più idoneo. Se siete a conoscenza di reazioni allergiche, informate il Vostro contattologo e fate attenzione alle sostanze contenute nei rispettivi sistemi di manutenzione, in particolare prima di iniziare ad utilizzare le lenti a contatto per la prima volta. I farmaci possono modificare il film lacrimale e influenzare la tollerabilità delle lenti a contatto nonché provocare la loro decolorazione. Informate il Vostro con-tattologo dei farmaci assunti. Prima di utilizzare i colliri, osservate le rispettive indicazioni riportate nel foglietto illustrativo dei preparati. Evitate di instillare il collirio sulle lenti a contatto, salvo rare eccezioni. A tale proposito, consultate il Vostro medico oculista..

Effetti indesiderati

Anche se le lenti a contatto morbide sono in genere ben tollerate, il potenziale rischio di infezioni è più elevato rispetto alle lenti a contatto rigide. In linea di massima si possono presentare reazioni con i seguenti fenomeni collaterali.

Sospendete l'uso delle lenti a contatto qualora insorgano i sintomi sotto indicati o sintomi simili:

- forte sensazione della presenza di un corpo estraneo
- arrossamento degli occhi
- peggioramento improvviso della capacità visiva
- fitte, bruciori, dolori
- eccessiva sensibilità alla luce
- formazione di secrezione all'occhio
- eccessivo flusso lacrimale
- annebbiamento visivo
- sensazione di secchezza agli occhi

Rivolgetevi subito al Vostro contattologo.

Comunicare al contattologo qualsiasi cambiamento nel comfort d'uso delle lenti a contatto, il peggioramento della capacità visiva o reazioni particolari..



Avvertenze particolari

Recatevi regolarmente dal Vostro contattologo per un controllo e per verificare lo stato d'uso delle lenti a contatto. Pulite e disinfettate le lenti a contatto sempre con molta cura secondo le rispettive indicazioni. Non superate il tempo d'uso giornaliero consigliato per le Vostre lenti a contatto. Non superate gli intervalli di sostituzione delle lenti prescritti dal produttore poiché ciò potrebbe compromettere la capacità visiva. Se compaiono arrossamenti agli occhi, togliete subito le lenti a contatto e rivolgetevi al Vostro contattologo! Non utilizzate lenti a contatto danneggiate. Osservate le istruzioni per l'uso dei prodotti per la cura delle lenti a contatto. Non utilizzate lenti a contatto e prodotti di manutenzione dopo la data di scadenza. Anche se le